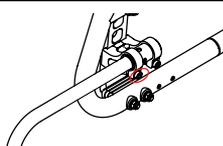
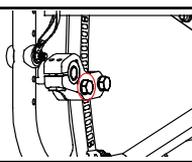
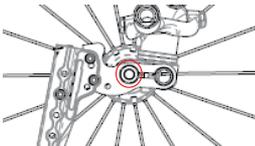
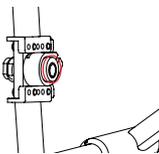
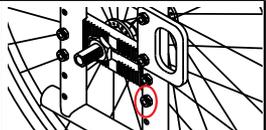


Instrucciones Inserciones Barra Adaptada para Plegables

NOTA: Consulte las instrucciones proporcionadas por separado en relación al montaje de la barra adaptada para plegables.

Uso de las Inserciones (Adaptadores)

Si las puntas del quick realese están empotradas o no son accesibles para los capuchones estándar de la barra adaptada y no se pueden encajar, puede ser necesario el uso de uno de las inserciones proporcionadas. El punto de sujeción a la silla debe estar lo más cercano posible a la altura del eje de las ruedas traseras de la silla. Utilice la tabla siguiente y los tornillos proporcionados para anclar la inserción correcta a los casquillos roscados de los capuchones de la barra adaptada.

Imagen de la Inserción	Diámetro de la Inserción	Imagen de anclaje	Tipo de Silla
	0,39" de Diámetro Interior		Quickie 2 Lite [con antivuelcos] en el cabezal del tornillo
	0,67" de Diámetro Interior		TiLite Aero X / 2GX [sin puntas en el eje] en el tornillo con cabeza hexagonal
	22 mm de Diámetro Interior		Quickie / Sopur / Neon / Xenon - sobre la clavija del eje
	1.0" de Diámetro Interior		TiLite [sin puntas en el eje] sobre la clavija del eje
	1,25" de Diámetro Interior	No disponible	Nueva TiLite TX - sobre el eje / sección del camber
Sin Inserción	0,5" Diámetro Interior [final del casquillo]		Quickie 2 [con un único brazo / sin puntas en el eje] en la tuerca de la placa del eje